

Carnoy



Solução fixadora



Dispositivo médico-diagnóstico in vitro

EMDN : W01030705

BASIC UDI: 080341202W01030705AJ

IVD na Classe A, Reg. UE 2017/746

Código	Corte/unidade de venda	UDI-DI
05-01013E	2,5 l	08034120277198

Packaging Embalagem primária: tanque PE, capacidade de 5 litros. Tampa rosca PE com anel de selagem. Vedação estanque.

Rótulo em PVC resistente ao desgaste e à água, álcool, solventes. Tinta anti-riscos resistente à água e ao álcool.

Fim previsto Preparado para o processamento de amostras histológicas a examinar em microscopia ótica.

Aplicação Fixador para citologia e histologia.
Em citologia é utilizado pela sua atividade hemolítica.
Em histologia é eletivo para o glicogénio e quando se pretendem utilizar colorações específicas para a evidenciação do RNA (verde metil-pironina).

Princípio Fixador coagulante.
O fixador atua sobre as proteínas determinando a destruição da estrutura terciária, tornando-as insolúveis.

Técnica de fixação 1) Relação volumétrica amostra/fixador 1:50
2) Duração da fixação (fragmentos até 5 mm): 2-3 horas à temperatura ambiente, 1 dia a 4°C.

N.B.: após a fixação, sugerimos que não lave em água, mas que passe diretamente em álcool para a desidratação.

Componentes

Componentes	CAS	CE	Index
Clorofórmio	67-66-3	2006638	602-006-00-4
Etanol 95°	64-17-5	2005786	603-002-00-5
Ácido acético	64-19-7	2005807	607-002-00-6

Advertências e precauções O produto destina-se à utilização profissional de laboratório para profissionais de saúde.
O produto é classificado como perigoso.

Leia atentamente as informações contidas na etiqueta (símbolos de perigo, frases de risco e de segurança) e consulte sempre a ficha de segurança. Não utilize caso a embalagem primária esteja danificada.

É recomendável, em caso d'incidente grave, de informar imediatamente a Bio-Optica Milano spa e as autoridades competentes.

Conservação Conserve o preparado à temperatura ambiente. Mantenha as embalagens devidamente fechadas.

Estabilidade Após a primeira abertura, o reagente deve considerar-se válido e reutilizável até à data de validade indicada, desde que seja corretamente conservado. Validade do produto: 2 anos.

Eliminação Resíduo perigoso; entregue-o a empresas especializadas e autorizadas, segundo a legislação vigente.

REVISÃO Nº	MOTIVAÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO
001	Conformidade com o Regulamento 746 IVDR	16/05/2022