

Carnoy



Fixačný roztok



Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro

EMDN : W01030705

BASIC UDI: 080341202W01030705AJ

IVD, trieda A, nariadenie (EU) 2017/746

Katalogové číslo	Veľkosť jednotky	UDI-DI
05-01013E	2,5 l	08034120277198

Balenie Primárna nádoba: Fľaša z PE, objem 5 litrov. Skrutkovací uzáver z PE s tesnením. Vodotesná.

Štítok z PVC odolný proti opotrebovaniu, vode, alkoholom a rozpúšťadlám. Atrament odolný proti poškrabaniu, odolávajúci vode a alkoholom.

Zamýšľané použitie Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu.

Použitie Fixačný prostriedok pre histológiu a cytológiu. V cytológii: využíva sa pre svoju hemolytickú aktivitu.

V histológii: je elektívny pre glykogén a ak chcete použiť špecifické farbenie na zvýraznenie RNA (metylová zelená – pyronín).

Princíp fungovania Koagulačný fixačný prostriedok.
Fixačný prostriedok pôsobí na proteíny a spôsobuje deštrukciu ich terciárnej štruktúry, čím sa stávajú nerozpustnými.

Fixačná technika 1) Pomer objemu vzorky a fixačného prostriedku 1 : 50
2) Doba fixácie pre hrúbky do 5 mm: 2–3 hodiny pri izbovej teplote, 1 deň pri 4 °C
Poznámka: po fixácii nepremývajte vo vode, ale priamo dehydrujte preliatím alkoholu.

Zložky

Zložky	CAS	CE	Index
Chlóroform	67-66-3	2006638	602-006-00-4
Etanol 95°	64-17-5	2005786	603-002-00-5
Kyselina octová	64-19-7	2005807	607-002-00-6

Varovania a bezpečnostné opatrenia Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre odborných zdravotníckych pracovníkov.

Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly nebezpečenstva, R-vety a S-vety) a vždy sa oboznámte s informáciami uvedenými v karte bezpečnostných údajov. Nepoužívajte, ak je poškodený primárny obal.

V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. a príslušné úrady.

- Skladovanie** Pripravený preparát uchovávať pri izbovej teplote. Nádoby uchovávať tesne uzavreté.
- Stabilita** Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až do dátumu expirácie za predpokladu jeho správneho uchovávania. Trvanlivosť produktu: 2 roky.
- Likvidácia** Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov.

Č. REVÍZIE	DÔVOD	DÁTUM REVÍZIE
001	Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR	16/05/2022