

## Hollande



**IVD** In vitro diagnostikas medicīnas ierīce  
EMDN : W01030705  
**BASIC UDI: 080341202W01030705AJ**  
IVD A klase, Reg. (ES) 2017/746

Kataloga numurs	Elementa izmērs	UDI-DI
05-01030E	2,5 l	08034120277204

**Iepakojums** Pirmējais iepakojums: balta polietilēna tereftalāta (PET) pudele. Derīgais tilpums 2,5 litri. HDPE vāciņš. Vāciņš ar aizsardzību pret atvēršanu. Polietilēna tereftalāts ir termoplastisks polimērs no polimēru grupas. PET ir optimāla skābekļa, oglekļa dioksīda un citu gāzu barjera. Šim materiālam ir augsta pretestība pret ultravioleto starojumu un inerce attiecībā uz galvenajām ķīmiskajām vielām (šķīdinātāji: ksilēns, limonēns, šķīdrie parafīni, spirti, skābes, bāzes u.c.). Tas ir bioloģiski inerts. Tas veido labu ūdens un mitruma barjeru. Tam piemīt liela cietība un mehāniska pretestība. Pudeli var optimāli satvert. Pudelei nav rokturu, tādējādi tiek samazināta glabāšanai vajadzīgā vieta. Vāciņš ar aizsardzību pret nopilēšanu garantē tīrību un precīzu lietošanu. Sekundārais iepakojums: kartona kaste.

PVC etiķete ar noturību pret nodilumu, ūdeni, spirtu un šķīdinātājiem. Tinte ar noturību pret skrāpējumiem, aizsargā pret ūdeni un spirtu.

**Paredzētais mērķis** Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas palīdzību.

**Specifikācijas** pH 3,78  
Blīvums 1 036 (25°C)

**Lietojums** Histoloģisks un citoloģisks fiksatīvs. Lieliski izmantojams krāsošanā ar trihroma metodi. Nav ieteicams lietot asinsrades orgāniem, hemorāģiskiem audiem un nervu sistēmai.

**Metode** 1) Parauga/fiksatīva tilpumattiecība 1: 50  
2) Parauga biezums 1 cm maks.  
3) Fiksēšanas laiks istabas temperatūrā: līdz 5 mm bieziem paraugiem 2 stundas, biežākiem paraugiem 1-3 dienas

Sastāvdaļas	CAS	CE	Index
Pikrīnskābe	88-89-1	2018659	609-009-00-X
Vara acetāts	142-71-2	2055533	-
Etiķskābe	64-19-7	2005807	607-002-00-6
Formaldehīds 4% w/v	50-00-0	2000018	605-001-00-5
Dejonizēts ūdens			

<b>Brīdinājums un norāde par piesardzību</b>	Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības aprūpes speciālistiem. Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, riska un drošības frāzes) un obligāti skatiet drošības datu lapu. Nelietot, ja ir bojāts pirmējais iepakojums. Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes.
<b>Glabāšana</b>	Glabājiet preparātu istabas temperatūrā. Glabāt tvertnes cieši noslēgtas.
<b>Stabilitāte</b>	Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams atkārtoti līdz derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā. Produkta derīgums: 2 gadi.
<b>Iznīcināšana</b>	Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr.	IEMESLS	PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
001	Regulas korekcija (ES) 2017/746 – IVDR	16/05/2022