

Foszforwolfrámos hematoxin P.T.A.H.



In vitro orvosi diagnosztikai eszköz

UDI-DI: 08033976231880

BASIC UDI: 080339762W01030705X2

IVD A osztályban, Reg. EU 2017/746



Kód	Értékesítési méret/egység	UDI-DI
05-10017/L	1 l	08033976232573

Csomagolás Elsődleges tárolóedény: nagy sűrűségű polietilén flakon (PEHD). Hasznos térfogat 1 l. Fedő fehér szín.
PEHD dugó tökéletesen záró tömítéssel.

Kopásnak és víznek, alkoholnak oldószereknek ellenálló PVC címkék. Karcolásálló, víznek és alkoholnak ellenálló tinta.

Rendeltetés Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez.

Alkalmazás Hatóanyag a sejtmagok, fibrin, neuraglia és miofibrillum színezéséhez. Különösen a sima izomszövetnek a harántcsíkostól való megkülönböztetésére használják.

Elv A foszforwolfrámsav savas szállítóközegként szolgál a színezőanyag számára, úgy kémiai, mint fizikai kiválasztó kötődésekkel a szöveti elemekhez és a fibrinhez kapcsolva magát.

Módszer

- 1) Vizes metszetek
- 2) Kálium-permanganát 0,5% + kénsav 0,5%, 5 perc
- 3) Mossa le desztillált vízben
- 4) Oxálsav oldat, 1%, 5 perc
- 5) Mossa le desztillált vízben
- 6) Foszforwolfrámos hematoxin, egész éjjel
- 7) Mossa gyorsan le desztillált vízzel
- 8) Víztelenítés
- 9) Diafanizálás és balszam

Alkotóelemek

Alkotóelemek	CAS	CE	Index
Hematoxin C.I. 75290	517-28-2	2082373	-
Foszfor-volfrámsav	12501-23-4	215-682-7	-
Ioncserélt víz			

Figyelmeztetések és óvintézkedések A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi használatra készült.

A termék osztályba sorolása szerint veszélyes.

Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat (veszélyszimbólumok, kockázati és

biztonsági mondatok), és mindig olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges tárolóedény esetén.

Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása.

Tárolás

Tárolja a preparátumot 15–25 °C-on. Tartsa jól lezárva a tárolóedényeket.

Stabilitás

Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárati időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. A termék érvényességi ideje: 2 év.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint.

Bibliográfia

-

FELÜLV. SZ.	INDOKLAS	KÖZZETETEL NAPJA
001	Megfelel a 746 IVDR rendeletnek	16/05/2022