




## ZIEHL - NEELSEN

Cryptosporidium céljára

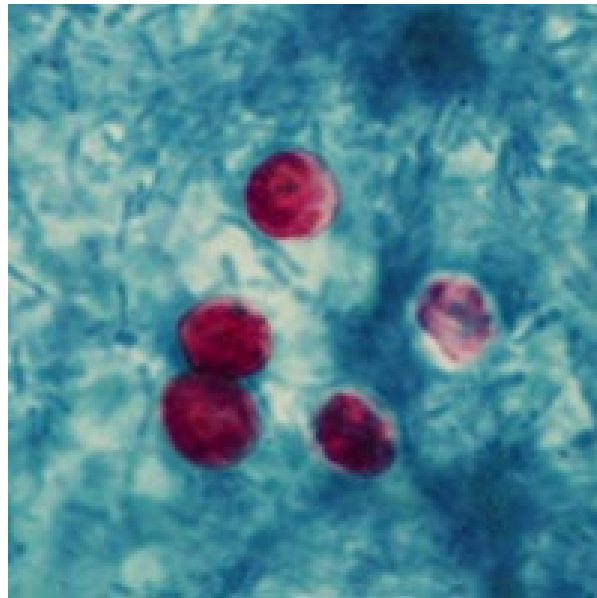

*Cryptosporidium*

KÓD	LEÍRÁS	TESZTSZÁM
04-110803	Ziehl – Neelsen Cryptosporidium céljára	N.E.

**IVD**

In vitro orvosdiagnosztikai eszköz  
EMDN: W01030799  
IVD az **A osztályban**, Reg. EU 2017/746  
Basic UDI: 080339762W0104010899D7  
UDI-DI: 08033976231125



Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A.

Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez.  
Cryptosporidium kimutatására szolgáló módszer székletanyag kenetekben.

### ELV

A módszer kiemeli a cryptosporidium petékben található sav-ellenálló alkotóelemeket, és egy kevésbé agresszív festékkivonó hatóanyag jelenléte jellemzi, mint a hagyományos sav-ellenálló bacillusos technikát.

### MÓDSZER

- 1) Fedje el teljesen a kenetet az A reagenssel. Hagyja hatni 10 percig
- 2) Mossa le desztillált vízben
- 3) Színtelenítő oldat. Hagyja hatni 10 – 15 másodpercig
- 4) Mossa le desztillált vízben
- 5) Fedje el teljesen a kenetet a C reagenssel (Malachitzöld oldat). Hagyja hatni 30 másodpercig.
- 6) Mossa le alaposan desztillált vízben.
- 7) Szárítsa a levegőn.



A kép illusztrációs célokat szolgál

### Részletezés

A módszer jellemzői	Kivitelezési idő	15 perc	
	Kiegészítő felszerelés	Nem szükséges	
	Eredmények	Cryptosporidium peték (átmérő 4-6 mikron):	Piros
Kontraszt:		Halványzöld	
Reagensek	A) Karbolfuxin oldat	500 ml	
	B) Színtelenítő oldat	2 x 500 ml	
	C) Malachitzöld oldat	500 ml	
Tárolás	Tárolás	A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A tárolóedényeket tartsa jól lezárva.	
	Tárolási hőmérséklet:	15 -25 °C	
	Stabilitás	Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárati időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják.	
	Érvényességi idő	2 év	
Figyelmeztetések és óvintézkedések	A termékek besorolása	<p>A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi használatra készült. A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat (veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és mindig olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges tárolóedény esetén.</p> <p>Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása.</p>	
	Hulladékba helyezés	Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint.	

FELÜLV. SZ.	INDOKLÁS	KÖZZÉTÉTEL NAPJA
001	Megfelel a 746 IVDR rendeletnek	2022.05.16.