




## ZIEHL - NEELSEN

*Voor cryptosporidium*

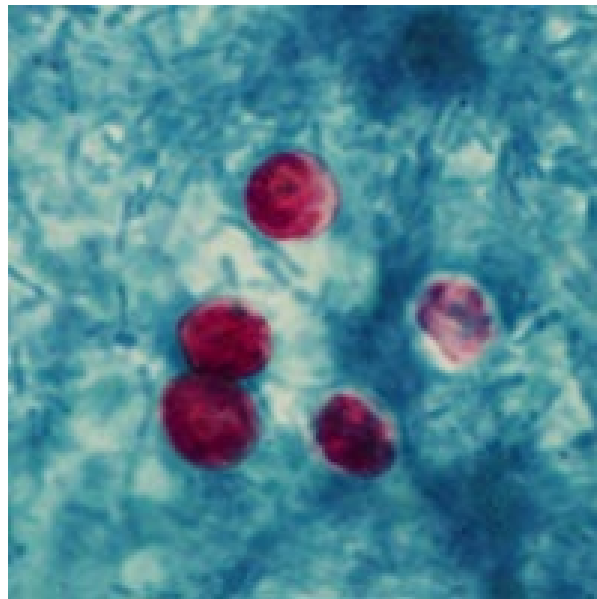

*Cryptosporidium*

CODE	BESCHRIJVING	AANTAL TESTS
04-110803	Ziehl Neelsen voor cryptosporidium	N.v.t.

**IVD**

In-vitro diagnostiek – medisch hulpmiddel  
EMDN: W01030799  
IVD in **klasse A**, verord. (EU) 2017/746  
Basic UDI: 080339762W0104010899D7  
UDI-DI: 08033976231125



Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A.

Product voor de preparatie van cyto-histologische monsters voor optische microscopie.  
Methode om cryptosporidium sp. oöcysten in fecale uitstrijkjes weer te geven.

### PRINCIPE

De methode laat zuursnelle componenten zien die aanwezig zijn in cryptosporidium-oöcysten. Ze wordt gekenmerkt door het gebruik van een zwakker ontkleurend middel dan het middel dat wordt gebruikt bij traditionele Zehl-Neelsen-kleuring.

### METHODE

- 1) Reagens A gedurende 10 minuten
- 2) Spoelen in gedistilleerd water.
- 3) Reagens B gedurende 10 – 15 seconden
- 4) Spoelen in gedistilleerd water
- 5) Reagens C gedurende 30 seconden
- 6) Spoelen in gedistilleerd water
- 7) Het uitstrijkje laten drogen aan de lucht



*De afbeelding is uitsluitend bedoeld ter illustratie*

### Technische details

Methodespecificaties	Duur procedure	15 minuten	
	Aanvullende hulpmiddelen	Niet nodig	
	Resultaten	Cryptosporidium sp. oöcysten (diameter 4 - 6 µm):	Rood
		Achtergrond:	Bleekgroen
Componenten	A) Carbofuchsineoplossing	500 ml	
	B) Ontkleuringsoplossing	2 x 500 ml	
	C) Malachietgroene oplossing	500 ml	
Opslag	Opslag	Het preparaat op kamertemperatuur bewaren. De houders goed gesloten houden.	
	Opslagtemperatuur	15-25°C	
	Stabiliteit	Na de eerste opening kan het product opnieuw worden gebruikt tot de vervaldatum, mits het op de juiste manier wordt bewaard.	
	Geldigheid	2 jaar	
Waarschuwing	Productclassificatie	Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik door beroepsmensen in de gezondheidszorg. Lees de informatie op het etiket (gevaarsymbolen, risico- en veiligheidssymbolen) zorgvuldig door en raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad. Niet gebruiken als de primaire verpakking beschadigd is. Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen.	
	Verwijdering	Gevaarlijk preparaat: neem alle nationale en lokale milieuvorschriften met betrekking tot afvalverwijdering in acht.	

REVISIE nr.	REDEN	REVISIEDATUM
001	Gewijzigde verordening (EU) 2017/746 - IVDR	16/05/2022