



AMILÁZIS

enzimatiskus lebontáshoz

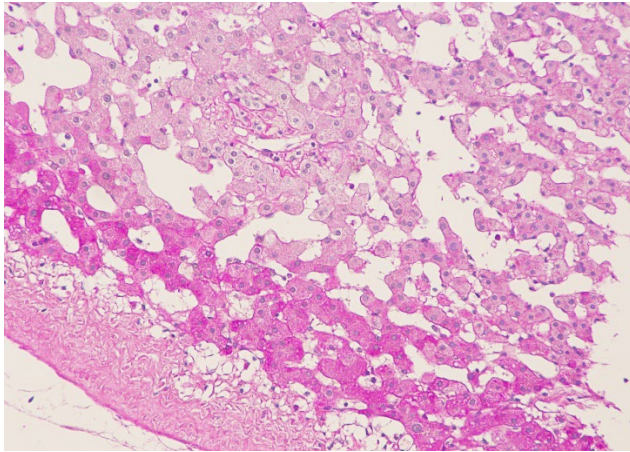

Máj glikonénnel

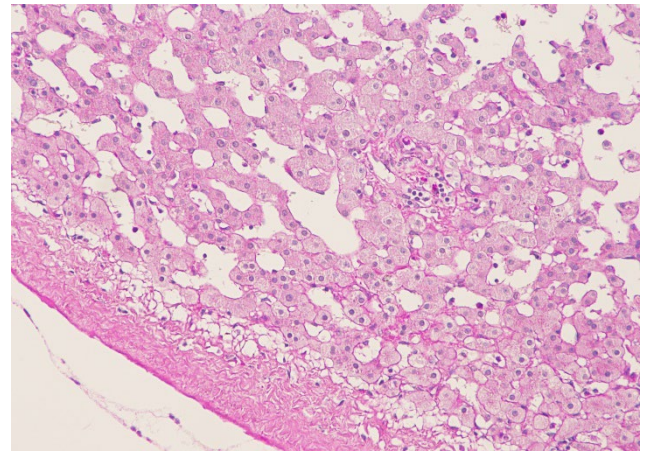

Máj enzimatiskus lebontás után

KÓD	LEÍRÁS	TESZTSZÁM
04-140808	Amilázis	100 teszt



In vitro orvosdiagnosztikai eszköz
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746
UDI-DI: 08033976230692
Basic UDI: 080339762W01030799Y5



Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A.

Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez.

Glikogén eltávolítás a következőkből

- Májszövet, paraffinba ágyazott metszetek: a szövettani metszeten amiláz oldattal történő lebontás akkor javasolt, ha a glikogént el kívánja távolítani, hogy csak a neutrális hámmucinokat figyelje meg. Ez a kiválasztó módszer a máj biopsziánál.
- Izomszövet: a szomszédos kriostatikus szakaszok vizsgálata, amelyek közül az egyik amilázzal kezelt, lehetővé teszi a glikogén jelenlétének minőségi értékelését.

MÓDSZER

- 1) Helyezze a metszetet desztillált vízbe.
- 2) Helyezze az amilázis oldatot környezeti hőmérsékletre.
- 3) Fedje el a metszetet az amiláz oldattal: hagyja hatni 10 percig környezeti hőmérsékleten
- 4) Mossa le többször a tárgylemezt desztillált vízben.
- 5) Haladjon rendben tovább a P.A.S. reakcióval.

Részletezés

A módszer jellemzői	Kivitelezési idő	10 perc
	Kiegészítő felszerelés	Függőleges tál
	Eredmények	A glikogén eltávolítása a PAS reakció után kimutatható, ha összehasonlítja a mintadarabot ugyanazon készítmény szomszédos, amilázzal nem kezelt szakaszával.
Reagensek	Bacillus Subtilis féle α amiláz pH 7,3 pufferoldatban	30 ml
Tárolás	Tárolás	Tárolja a preparátumot 2–8 °C-on. Tartsa jól lezárva a tárolóedényeket.
	Tárolási hőmérséklet:	2–8 °C
	Stabilitás	Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárati időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják.
	Érvényességi idő	1 év
Figyelmeztetések és óvintézkedések	A termékek besorolása	A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi használatra készült. A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat (veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és mindig olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges tárolóedény esetén. Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása.
	Hulladékba helyezés	Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint.

FELÜLV. SZ.	INDOKLÁS	KÖZZÉTÉTEL NAPJA
001	Megfelel a 746 IVDR rendeletnek	16/05/2022