



WB 100

Kruhová vodní lázeň



KÓD	POPIS	EMDN
40-300-002	Kruhová vodní lázeň pro histologické aplikace	W02079001



Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro

IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746

UDI-DI: 08034120271745

Basic UDI: 080341202W02079001D3



Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A.

Datum vydání: 18/11/2022

Rev. 002

Tato víceúčelová lázeň je vhodná k odstraňování tkání z parafínu, které přicházejí z mikrotomu. Vnitřní nádrž je vyrobena z černého eloxovaného hliníku, který usnadňuje pozorování materiálu uvnitř. Vnější když je proveden z hliníkového plechu s epoxidovým nátěrem. Meziprostor je izolován tepelnou izolací, aby se minimalizovaly tepelné ztráty a zajistila rovnoměrná teplota. Teploty se regulují a řídí pomocí termostatu se snímačem expanze kapaliny.

Přístroj je vybaven integrovaným bezpečnostním termostatem, který se aktivuje v případě selhání nebo vzrůst teploty nad 100 °C a přerušuje síťové napětí do ohřívače.

Zařízení zahrnuje protiprachový ochranný kryt z eloxovaného hliníku.

ROZMĚRY

Celkové rozměry v mm			Rozměry lázně v mm	
Hmotnost	Průměr	Výška	Průměr	Hloubka
cca 3,5 kg	345	100	225	50

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Objem lázně: 1,5 l
- Nastavení teploty: +30 °C až +80 °C
- Přesnost: Při +40 °C ±2 °C
- Krytí: IP54.

Technické údaje

Elektrické přípojky	Napětí	230 V~
	Frekvence	50/60 Hz.
	Výkon	200 W.
Jiné přípojky	Vodovodní přípojka	Nepožaduje se
	Nasávání/filtrování výparů	Nepožaduje se
Varování a bezpečnostní opatření	Klasifikace produktu	Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro odborné zdravotnické pracovníky.
	Poznámky	V případě závažné nehody okamžitě informujte společnost Bio-Optica Milano S.p.A a příslušné úřady.

REVIZE	POPIS	DATUM
001	Nařízení (EU) 2017/746 – novelizace IVDR	16. 5. 2022
002	Aktualizace EMDN	18. 11. 2022

Datum vydání: 18/11/2022
Rev. 002