




Trimming handle F-80HL

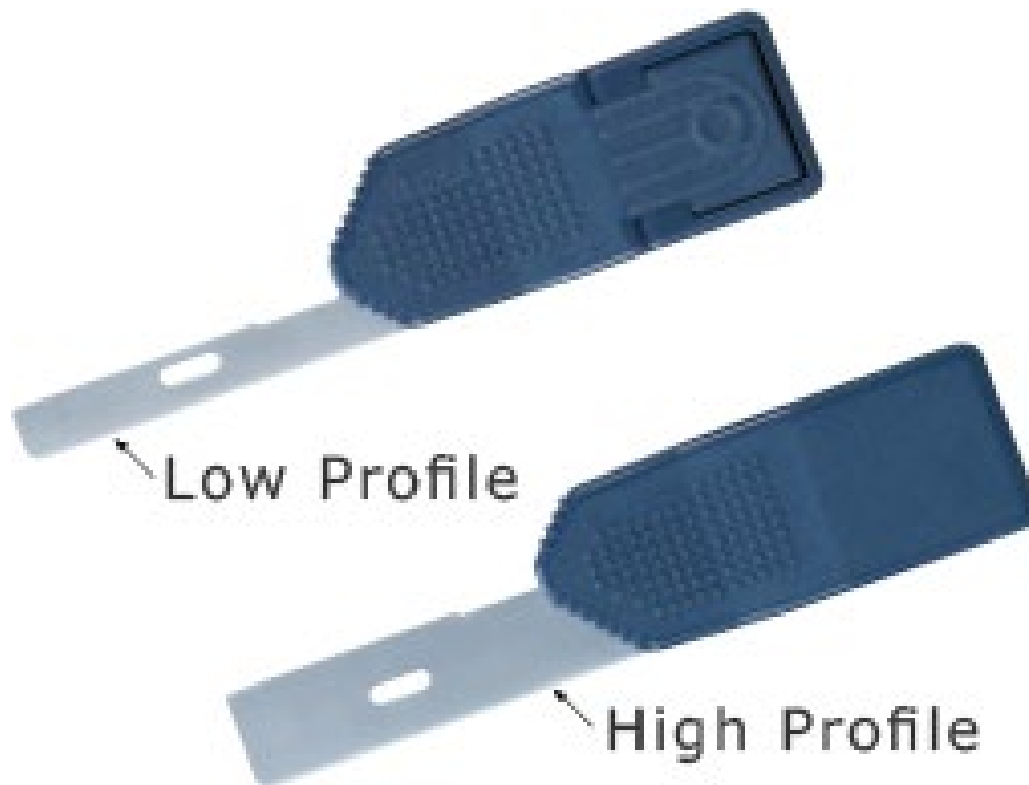

CODICE	DESCRIZIONE	LAMA CON CUI UTILIZZARLO	NUMERO PEZZI /CONFEZIONE
02-205560000	Trimming handle F-80HL	Lame da microtomo Feather (basso e alto profilo)	1 pz.



Dispositivo medico – diagnostico in vitro
Codice CND/EMDN: W05039080
Numero di Repertorio: 2676264



Fabbricante: FEATHER Safety Razor Co., Ltd.
5th FL., 5-2, Dojima 1-chome, Kita-ku,
Osaka 530-0003, Japan

Distributore esclusivo per l'Italia:
Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Data di pubblicazione: 04/10/2024

Rev. 03


Impugnatura in materiale plastico per l'utilizzo in riduzione delle lame da microtomia Feather®, sia a basso che ad alto profilo. Non autoclavabile.

ISTRUZIONI D'USO

Utilizzare solo con lame per microtomia originali Feather, modello A22, S22, A35, S35, R35, N35, N35HR (basso profilo) e S35HP (alto profilo).

Installazione della lama:

1. Far leva sull'impugnatura per aprirla dal lato opposto, come in figura a lato.
2. Inserire con cautela la lama dalla posizione di inserimento.
3. Assicurarsi che la lama sia installata orizzontalmente, poiché nel supporto della lama è presente un dispositivo di arresto di sicurezza. Prima dell'uso verificare sempre che la lama sia fissata correttamente.

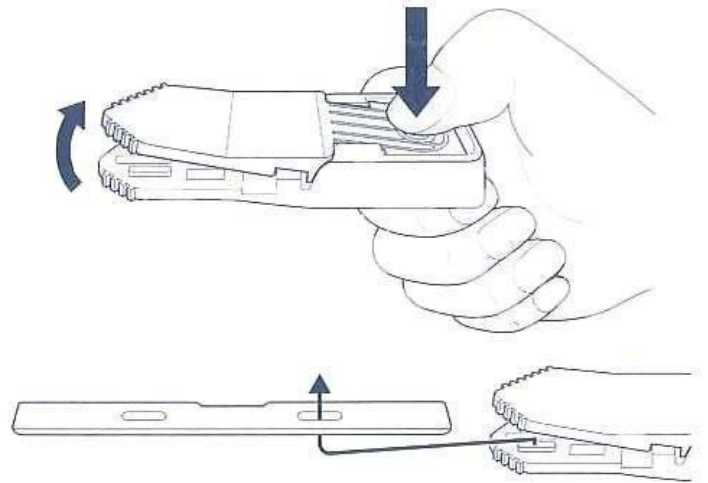

Attenzione

Inserire la lama con la dovuta cautela seguendo scrupolosamente le istruzioni. Si raccomanda l'utilizzo di guanti antitaglio.

ISTRUZIONI PER PULIZIA E DISINFEZIONE

Prima della pulizia rimuovere la lama dal manico. Non pulire il manico con la lama. Per la pulizia non utilizzare solventi organici come xilene o diluenti.

1. Pulire il manico con acqua distillata subito dopo l'uso.
2. Rimuovere tutte le tracce di sporco e contaminazione, compresi residui proteici, utilizzando una soluzione detergente in conformità alle singole disposizioni dell'istituto.
3. Sciacquare accuratamente con acqua distillata.
4. Asciugare accuratamente.

Attenzione

Prima di riutilizzare il prodotto, ispezionare visivamente il manico. Non usare qualora il prodotto risulti danneggiato.

Data di pubblicazione: 04/10/2024

Rev. 03

Specifiche

Dati tecnici	Materiale:	Plastica
	Lunghezza:	64,5 mm
	Lunghezza lame da utilizzare:	80 mm (lame da microtomo Feather)
	Altezza lame da utilizzare:	8 mm (basso profilo) 14 mm (alto profilo)
	Latex free:	sì
Packaging	Contenitore primario	Scatola in cartone
	Etichetta	Serigrafia
	Contenitore secondario	Non previsto
Conservazione	Stoccaggio	Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio.
	Temperatura di stoccaggio	Non sono previste particolari limitazioni.
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo, dopo la prima apertura.
	Validità	Non applicabile.
Avvertenze e precauzioni	Modalità di utilizzo	Il prodotto è particolarmente tagliente e affilato. Si raccomanda l'utilizzo di guanti antitaglio.
	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso.
	Smaltimento	Dopo l'utilizzo, rifiuto sanitario; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente.

Data di pubblicazione: 04/10/2024

Rev. 03