



Trimming handle F-80mini



CODICE	DESCRIZIONE	LAMA CON CUI UTILIZZARLO	NUMERO PEZZI /CONFEZIONE
02-205570000	Trimming handle F-80mini	Lame da microtomo Feather	1 pz.



Dispositivo medico – diagnostico in vitro
Codice CND/EMDN: W05039080
Numero di Repertorio: 2676268
Conforme al regolamento 746/2017



Fabbricante: FEATHER Safety Razor Co., Ltd.
5th FL., 5-2, Dojima 1-chome, Kita-ku,
Osaka 530-0003, Japan

Distributore esclusivo per l'Italia:
Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)


Data di pubblicazione: 04/10/2024

Rev. 03

Impugnatura per il riutilizzo di lame monouso da microtomo per la riduzione dei campioni chirurgici. Il manico F80 Mini è realizzato in materiale plastico, resistente alle sostanze chimiche e al calore. È autoclavabile ed è disegnato per consentire una facile presa

ISTRUZIONI D'USO

Inserire la lama per microtomo, facendola scorrere sulla guida di plastica, posta anteriormente all'impugnatura, quindi serrare con l'apposita chiusura e assicurarsi che la lama sia ben ferma.

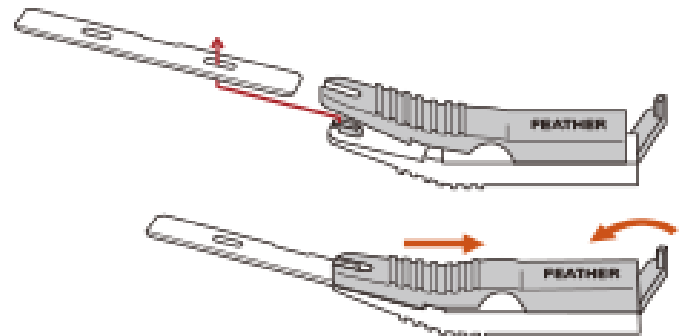

Attenzione

Inserire la lama con la dovuta cautela seguendo scrupolosamente le istruzioni.

Si raccomanda l'utilizzo di guanti antitaglio.

Specifiche

Dati tecnici	Materiale:	Plastica
	Lunghezza:	80 mm
	Lunghezza lame da utilizzare:	80 mm (lame da microtomo Feather)
	Latex free:	sì
Packaging	Contenitore primario	Scatola in cartone
	Etichetta	Serigrafia
	Contenitore secondario	Non previsto
Conservazione	Stoccaggio	Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari modalità di conservazione e stoccaggio.
	Temperatura di stoccaggio	Non sono previste particolari limitazioni.
	Stabilità	Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo, dopo la prima apertura.
	Validità	Non applicabile.
Avvertenze e precauzioni	Modalità di utilizzo	Il prodotto è particolarmente tagliente e affilato. Si raccomanda l'utilizzo di guanti antitaglio.
	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso.
	Smaltimento	Dopo l'utilizzo, rifiuto sanitario; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente.

Data di pubblicazione: 04/10/2024

Rev. 03