



## HISTOCOLD

Opbevaringsystem for en sikker transport af histologiske prøver  
fra operationsstuen til PA-laboratoriet  
(I overensstemmelse med EU-bestemmelsen 605/2014)



| KODE      | BESKRIVELSE                             | EMBALLAGE              | DIMENSION           |
|-----------|---|------------------------|---------------------|
| 05-100200 | HistoCold opløsningsdispenser + printer | 1 stk.                 | 781 x 340 x 1230 mm |
| 05-100205 | Etiketrolle til HistoCold-printer       | 1 stk. (500 etiketter) | 55 x 110 mm         |



Producent: Bio-Optica Milano S.p.A.

Udstedelsesdato: 29/02/2024

Rev. 002

### *HistoCold opløsningsdispenser*

Kolonnekøler til dispensering af HistoCold ved kontrolleret temperatur. Instrumentet er udstyret med en pedal til enkel dispensering af væsken. Instrumentets struktur er AISI 304 stål.

HistoCold-dispenseren giver mulighed for at dispensere væsken gennem svanehalshannen, som kan aktiveres med en speciel pedalkontrol for større hygiejne.

Kode 05-100200 inkluderer skærm og printer.

### *Brugsanvisning*

1. Åbn HistoCold-tanken ved at fjerne hættten;
2. Skru dispenserens flyder på HistoCold-tanken;
3. Tryk på dispenserpedalen for at dispensere opløsningen.




Udstedelsesdato: 29/02/2024

Rev. 002

### Tekniske funktioner

|                            |                         |   |
|----------------------------|-------------------------|---|
| Dimensionfunktioner        | Dimensioner (B x D x H) | 781 x 340 x 1230 mm   |
|                            | Støtteflade (B x D)     | 456 x 340 mm  |
|                            | Vægt                    | 52 Kg   |
| Elektriske tilslutninger   | Strømforsyning          | 230 V   |
|                            | Frekvens                | 50 ÷ 60 Hz  |
|                            | Strøm                   | 0,2 kW  |
| Advarsel og forholdsregler | Produktklassificering   | Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af sundhedsprofessionelle. |
|                            | Anbefalinger            | I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du omgående informerer                  |

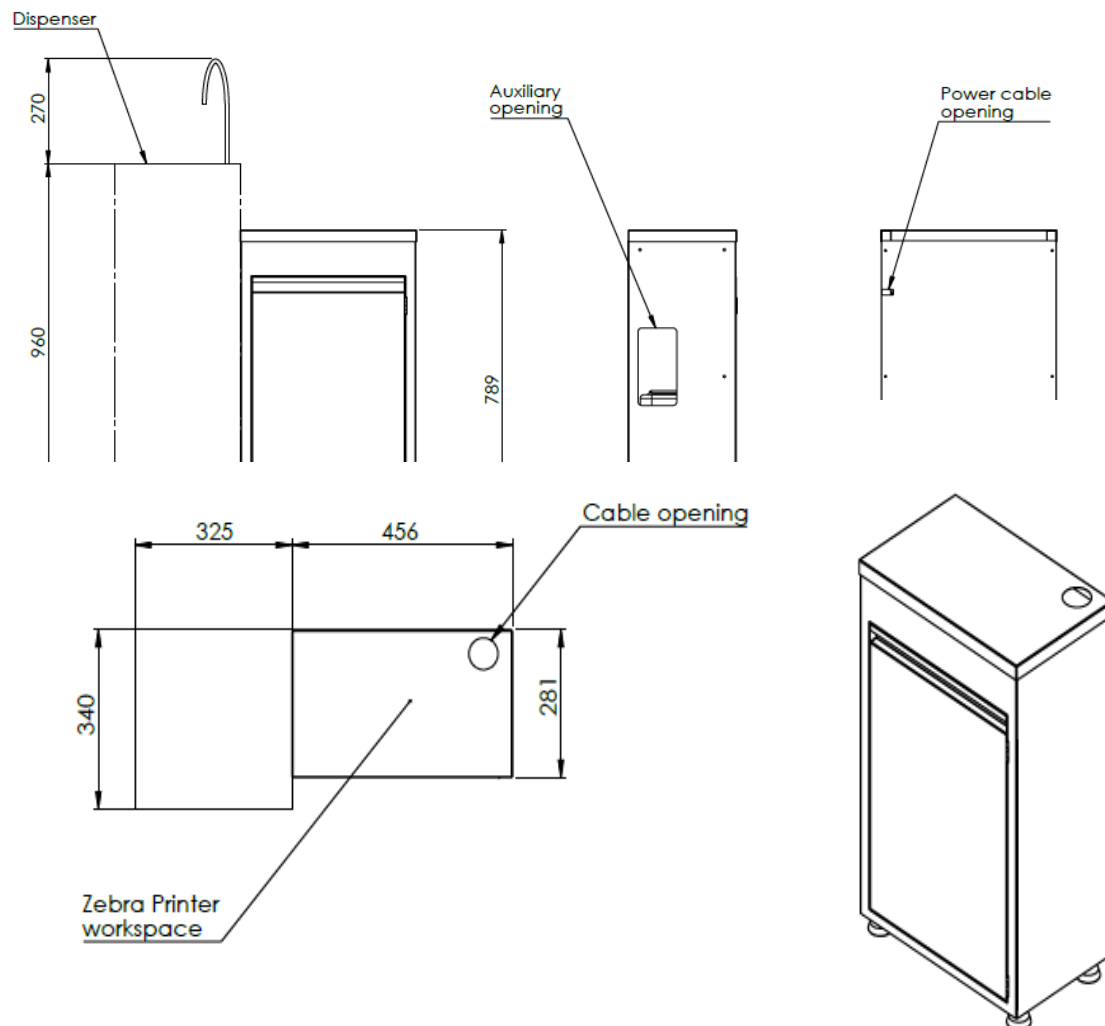

Udstedelsesdato: 29/02/2024

Rev. 002