



BIOPSY BAGS

Biopsie-Beutel



CODE	ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	UDI-DI
07-00005	30 x 45 mm	1000 Stk	08033976235192
07-00003	45 x 60 mm	1000 Stk	08033976235178



Medizinprodukt - In-vitro-Diagnostikum
IVD in **Klasse A**, Reg. EU 2017/746

Basic UDI: 080339762W05030580ZA



Hersteller: Bio-Optica Milano S.p.A.



Einwegprodukt

Veröffentlichungsdatum: 11/04/2024
Rev. 002


Olysterbeutel für die histologische Verarbeitung von Biopsien und Proben geringer Abmessungen.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN


Zum Schutz der Proben, um zu vermeiden, dass sie während der Verarbeitung ganz oder teilweise verloren gehen. Sie werden durch Ultraschallschneiden und -schweißen hergestellt; die feinen Maschen verhindern den Verlust von kleinen Proben.

GEBRAUCHSANWEISUNG


1. Fixiermittel und Biopsie in den Nylonbeutel geben; der Beutel filtert die Flüssigkeit und hält die Probe zurück. Den Beutel wieder verschließen und in eine Standardeinbettungskassette (Bio-Kassette) legen. Dann mit der normalen Verarbeitung fortfahren.

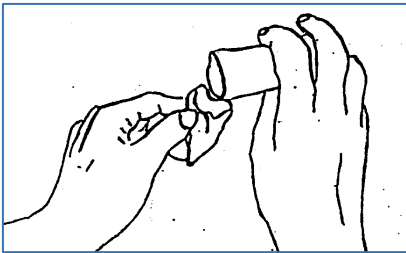

2. Nach der Verarbeitung den Beutel aus der Bio-Kassette nehmen und ihn vorsichtig öffnen, indem an den Laschen gezogen wird.

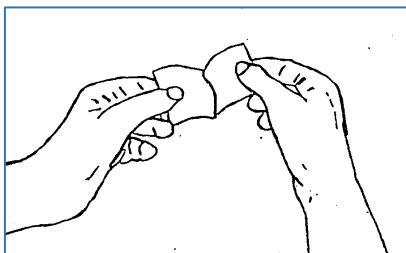

3. Die Biopsie entnehmen und die Probe in Paraffin einbetten.

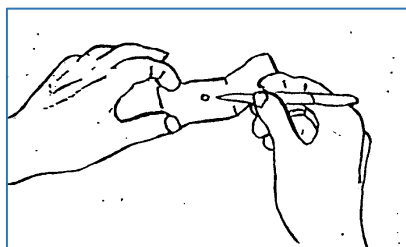

Veröffentlichungsdatum: 11/04/2024
Rev. 002

Spezifikationen

Technische Spezifikationen	Chemische Zusammensetzung	Polyester
	Abmessungen der Poren	zirca 0,184 mm
	Abmessungen	Siehe Tabelle auf Seite 1
Verpackung	Primärbehälter	Kunststoffbeutel
	Sekundärbehälter	Pappkarton
Lagerung	Lagerungsbedingungen	In Anbetracht des Produkttyps sind keine besonderen Aufbewahrungs- und Lagerungshinweise zu befolgen.
	Haltbarkeit	Das Produkt ist in Laufe der Zeit stabil.
	Haltbarkeit	Nicht zutreffend für diesen Produkttyp.
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	Produktklassifizierung	Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch im Labor durch Fachpersonal bestimmt. Das Produkt ist unter dem chemischen Aspekt nicht als gefährlich eingestuft. Für diesen Produkttyp sind keine speziellen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen vorgesehen.
	Entsorgungshinweise	Gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.
	Empfehlungen	Es wird empfohlen, im Falle eines schweren Unfalls sofort Bio-Optica Milano spa und die zuständigen Behörden zu informieren.

REVISION NR.	GRUND	REVISIONSDATUM
001	Anpassung an die EU-Verordnung 2017/746 - IVDR	16.05.2022
002	Code 07-00004 wird entfernt	11.04.2024

Veröffentlichungsdatum: 11/04/2024
Rev. 002