

BIOPSY BAGS

Σακοι βιοψιας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	UDI-DI
07-00005	30 x 45 mm	1000 τμχ.	08033976235192
07-00003	45 x 60 mm	1000 τμχ.	08033976235178



In Vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν
IVD Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746



Κατασκευαστής: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05030580ZA



Αναλώσιμα

Ημερομηνία έκδοσης: 11/04/2024

Αναθ. 002


Μικροί σάκοι από πολυεστέρα για την επεξεργασία δειγμάτων βιοψιών και ιστολογικών δειγμάτων.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Σάκοι για την προστασία των δειγμάτων αποφεύγοντας τον κίνδυνο πλήρους ή μερικής απώλειας κατά την επεξεργασία. Οι σάκοι βιοψίας της Bio-Optica παράγονται με κοπή και συγκόλληση με υπερήχους. Το λεπτό πλέγμα αποτρέπει την απώλεια μικρών δειγμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


1. Αδειάστε το μονιμοποιητικό και το δείγμα στο σάκο. Ο σάκος φιλτράρει το μονιμοποιητικό και το δείγμα βιοψίας παραμένει τέλεια στο εσωτερικό. Κλείστε το σάκο και τοποθετήστε τον σε τυπική κασέτα βιοψίας. Προχωρήστε την επεξεργασία ως συνήθως.

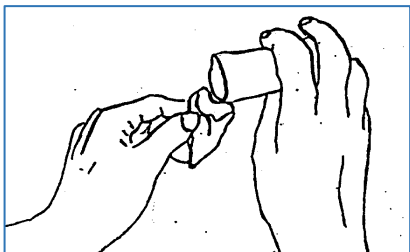

2. Μετά την επεξεργασία, βγάλτε τον σάκο από την κασέτα, ανοίξτε τον με προσοχή εκτείνοντας τις άκρες.

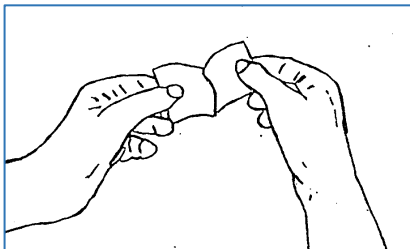

3. Εξαγάγετε το δείγμα και εγκλείστε το σε παραφίνη.

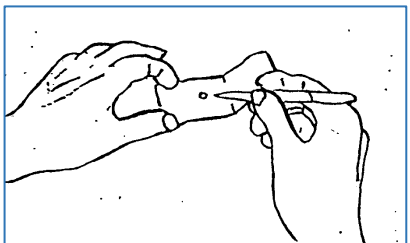

Ημερομηνία έκδοσης: 11/04/2024

Αναθ. 002

Τεχνικά δεδομένα

Τεχνικά δεδομένα	Σύνθεση	Πολυεστέρας
	Μέγεθος πόρων	περίπου 0,184 mm
	Διαστάσεις	Ανατρέξτε στον πίνακα στη σελίδα 1
Συσκευασία	Κύριος περιέκτης	Πλαστικός φάκελος
	Δευτερεύων περιέκτης	Χαρτοκιβώτιο
Αποθήκευση	Συνθήκες αποθήκευσης	Καμία
	Σταθερότητα	Μετά το πρώτο άνοιγμα, το προϊόν παραμένει σταθερό.
	Εγκυρότητα	Δεν προβλέπεται για αυτό το είδος προϊόντος
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις	Ταξινόμηση του προϊόντος	Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση για επαγγελματίες υγείας. Το προϊόν δεν είναι χημικά επικίνδυνο. Δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα και προφυλάξεις.
	Απόρριψη	Τηρήστε όλους τους κρατικούς και τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των απορριμμάτων.
	Συστάσεις	Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να ενημερώσετε αμέσως την Bio-Optica Milano S.p.A και τις αρμόδιες αρχές.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ αρ.	ΑΙΤΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
001	Προσαρμογή κανονισμού UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022
002	Αφαίρεση κωδικού 07-00004	11/04/2024

Ημερομηνία έκδοσης: 11/04/2024

Αναθ. 002