



BIOPSY BAGS

Biopsijas materiālu maisiņi



KODS	IZMĒRI	IEPAKOJUMS	UDI-DI
07-00005	30 x 45 mm	1000 gab.	08033976235192
07-00003	45 x 60 mm	1000 gab.	08033976235178



In vitro diagnostikas medicīnas ierīce
IVD A klase, Reg. (ES) 2017/746



Ražotājs: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05030580ZA



Vienreizlietojams

Izdošanas datums: 11/04/2024
Red. 002

Mazi poliestera maisiņi biopsijas un histoloģisku paraugu apstrādei.

VISPĀRĪGAS PAZĪMES

Maisiņi paraugu aizsardzībai novērš to pilnīgas vai daļējas pazušanas risku apstrādes laikā.


Bio-Optica biopsijas materiālu maisiņu ražošanā ir izmantota griešana un ultraskaņas lodmetāls; smalkais tīkliņš nepieļauj mazo paraugu pazušanu.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA


1. Ievietojiet fiksatīvu un paraugu maisiņā; maisiņš filtrē fiksatīvu un viss biopsijas materiāls paliek iekšpusē. Aizveriet maisiņu un ievietojiet to standarta biopsijas kasetē. Veiciet apstrādi kā parasti.



2. Pēc apstrādes izņemiet maisiņu no kasetes un uzmanīgi atveriet to, paplešot malas.

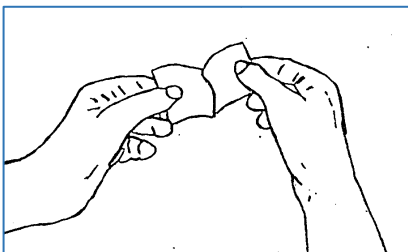

3. Izvelciet paraugu un ieguldi to parafīnā.

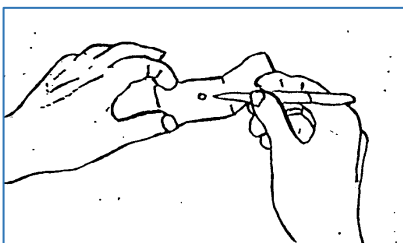

Izdošanas datums: 11/04/2024

Red. 002

Tehniskie dati

Tehniskie dati	Sastāvs	Poliesteris
	Poru izmērs	aptuveni 0,184 mm
	Izmēri	Skat. tabulu 1. lpp.
Iepakojums	Pirmējais iepakojums	Plastmasas mape
	Sekundārais iepakojums	Kartona kaste
Glabāšana	Glabāšanas nosacījumi	Nav
	Stabilitāte	Pēc pirmās atvēršanas produkts ir stabils.
	Derīgums	Nav attiecināms uz šāda veida produktu
Brīdinājums un norādes par piesardzību	Produkta klasifikācija	Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības aprūpes speciālistiem. Produkts nav ķīmiski bīstams. Nav nepieciešami brīdinājumi un piesardzības pasākumi.
	Iznīcināšana	Ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos noteikumus attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu.
	Ieteikumi	Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes.

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr.	IEMESLS	PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
001	Regulas korekcija (ES) 2017/746 – IVDR	16.05.2022.
002	Koda 07-00004 noņemšana	11.04.2024

Izdošanas datums: 11/04/2024

Red. 002