



## **BIOPSY BAGS**

Pungi pentru biopsie



COD	DIMENSIUNI	AMBALAJUL	UDI-DI
07-00005	30 x 45 mm	1000 buc.	08033976235192
07-00003	45 x 60 mm	1000 buc.	08033976235178



Dispozitiv medical pentru diagnosticare in-vitro  
IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) **Clasa A**, Reg.  
UE 2017/746



Producător: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05030580ZA



De unică folosință

Data publicării: 11/04/2024  
Rev. 002

Pungi mici din poliester pentru procesarea biopsiilor și a probelor histologice.


### CARACTERISTICI GENERALE

Pungi pentru protejarea probelor pentru prevenirea riscului de pierdere totală sau parțială a acestora în timpul procesării.


Pungile pentru biopsie Bio-Optica sunt produse prin tăiere și sigilare cu ultrasunete; plasa foarte fină previne pierderea probelor de dimensiuni reduse.

### INSTRUCIUNI DE UTILIZARE


1. Puneți fixativul și proba în pungă, punga filtrează fixativul și biopsia rămâne perfectă în interior. Închideți punga și puneți-o într-o casetă standard pentru biopsii. Continuați cu procesarea ca de obicei.

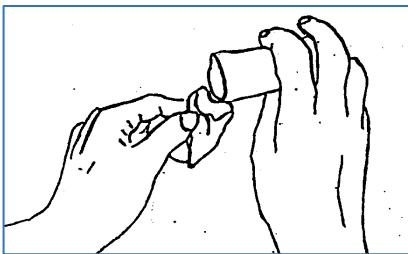

2. După procesare, extrageți punga din casetă, deschideți-o cu atenție întinzând marginile.

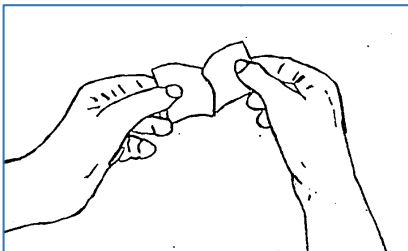

3. Extrageți proba și încorporați-o în parafină.

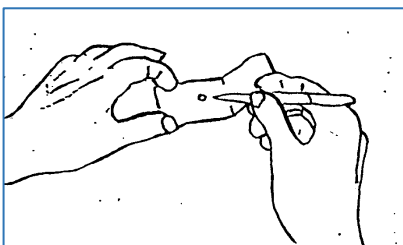

Data publicării: 11/04/2024

Rev. 002

### Date tehnice

Date tehnice	Compoziție	Poliester
	Dimensiune pori	aprox. 0,184 mm
	Dimensiuni	Consultați tabelul de la pagina 1
Ambalaj	Ambalaj primar	Dosar de plastic
	Ambalaj secundar	Cutie de carton
Depozitare	Condiții de depozitare	Niciuna
	Stabilitate	După prima deschidere, produsul este stabil.
	Valabilitate	Nu se aplică la acest tip de produs
Avertizări și măsuri de precauție	Clasificarea produsului	Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul medical în laboratoare profesionale. Produsul nu este periculos din punct de vedere chimic. Nu sunt necesare avertizări și măsuri de precauție.
	Eliminarea	Respectați toate reglementările de mediu, de stat și locale, privind eliminarea deșeurilor.
	Recomandări	În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat Bio-Optica Milano S.p.A și autoritățile competente.

REVIZUIREA nr.	MOTIV	DATA REVIZUIRII
001	Modificare a Regulamentului UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022
002	Se elimină codul 07-00004	11/04/2024

Data publicării: 11/04/2024  
Rev. 002