




SUPERMEGACASSETTE

Za uklapanje

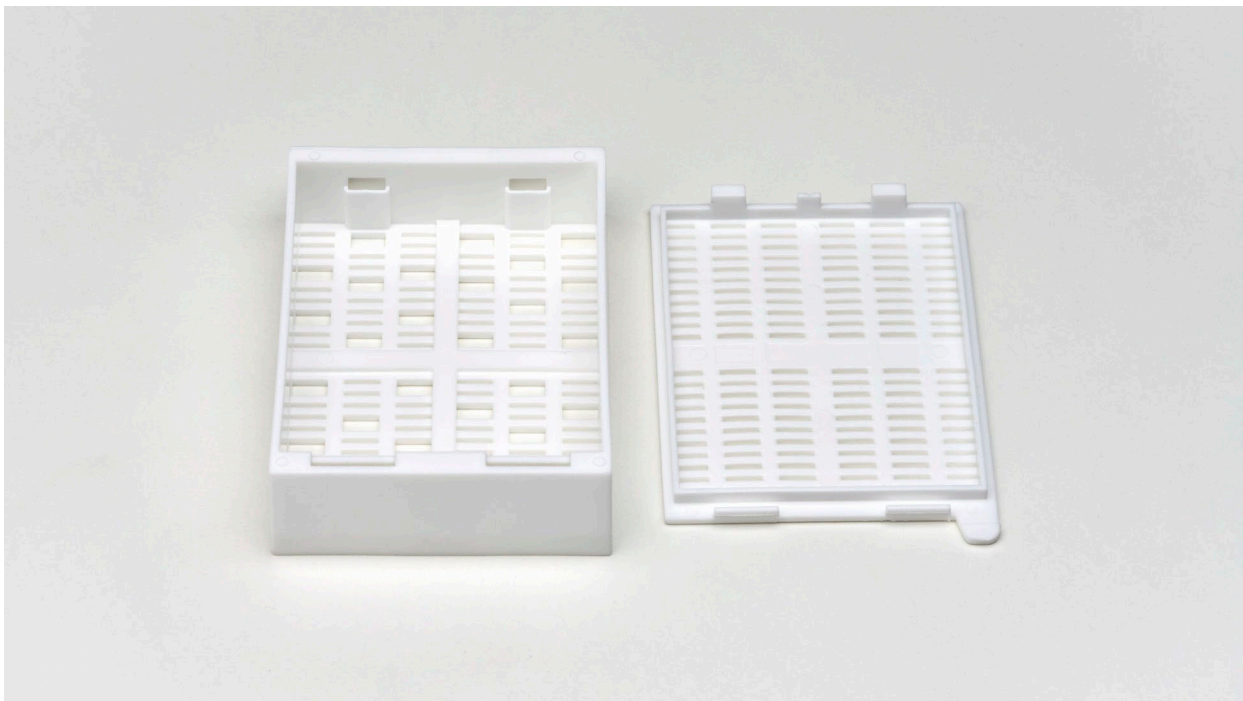

ŠIFRA	BOJA	AMBALAŽA
07-7000	Bijela	200 kom. (3 dozatora: 2 sa 100 kom. kasete SuperMegaCassettes i 1 s 200 kom. poklopaca)



In-vitro medicinsko-dijagnostički proizvod
IVD Klasa A, Ur. (EU) 2017/746



Proizvođač: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05030501YL
UDI-DI: 08033976235215



Jednokratan

Datum izdanja: 16/05/2022
Rev. 001

Kaseta za uklapanje za makro sekcije.

OPĆE ZNAČAJKE

Histološke kasete za uklapanje makro sekcija, s dvostrukim sustavom zatvaranja kako bi se zajamčila savršena nepropusnost tijekom postupka obrade.

Izrađene su od acetalnog polimera: ovaj polimer stabilan je na visokim temperaturama, pri mikrovalnim postupcima, otapalima, kiselinama i lužinama; stoga je taj materijal optimalan za obradu i faze uklapanja u histološkim procesima.

Identifikacija uzorka moguća je zahvaljujući smežuranoj površini na tri stranice kasete. Te su površine prikladne da se po njima piše kemijskom olovkom. Preporučujemo da se za trajno označavanje upotrijebi histološki flomaster (šifra 11-50 ili 11-400).

Osim tradicionalnih kasete za makro sekcije, Bio-Optica SuperMegaCassettes imaju nekoliko većih otvora. Na taj način parafin bolje prianja za kasetu, tijekom uklapanja, izbjegavajući prekid bloka tijekom rezanja mikrotomu.

Kasete za uklapanje proizvodimo služeći se svojim najboljim tehničkim vještinama, međutim, zbog složenosti samih detalja i vrste korištenog materijala, potrebno je uzeti u obzir da je fiziološka količina neispravnih kasete jednaka 5,000 PPM (eng. Parts Per Million, dijelova na milijun), što odgovara postotku od 0,5 %. U ovoj količini, Bio-Optica ne prihvaća pritužbe i/ili zahtjeve za zamjenu u okviru jamstva.

Tehnički podaci

Tehnički podaci	Kemijski sastav	Acetalni polimer (polioksimetilen poliacetal).
	Unutarnje dimenzije	62 x 48 x 14 mm
	Vanjske dimenzije	73 x 53 x 16 mm
Ambalaža	Primarni spremnik	Kartonska dozirna kutija s otvorom s prednje strane za vađenje kasete
	Sekundarni spremnik	Kartonska kutija
Čuvanje	Uvjeti čuvanja	Ništa
	Stabilnost	Nakon prvog otvaranja, proizvod je stabilan.
	Valjanost	Nije primjenjivo na ovu vrstu proizvoda
Upozorenje i mjere opreza	Upute za uporabu	Nisu potrebne za ovaj proizvod.
	Klasifikacija proizvoda	Proizvod je namijenjen zdravstvenim djelatnicima za profesionalnu laboratorijsku upotrebu. Proizvod nije kemijski opasan. Mjere upozorenja i predostrožnosti nisu potrebne.
	Odlaganje	Pridržavati se svih državnih i okolišnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje otpada.
	Preporuke	U slučaju ozbiljnog incidenta, preporučujemo da odmah informirate tvrtku Bio-Optica Milano S.p.A i nadležna tijela.

IZMJENA br.	RAZLOG	DATUM IZMJENE
001	Prilagodba uredbe (EU) 2017/746 - IVDR	16.5.2022.

Datum izdanja: 16/05/2022

Rev. 001