

BIO FIX



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
05-X200	4 x 200 ml

IVD

Ιατροτεχνολογικό διαγνωστικό προϊόν in vitro
EMDN: W01030705
IVD σε **Κατηγορία A**, Reg. UE 2017/746



Κατασκευαστής: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W01030705X2
UDI-DI: 08033976235079

Μονιμοποιητικό ψεκασμού για κολπική κυτταρολογία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

- 1) Ψεκάστε ομοιόμορφα στο επίχρισμα (3-4 φορές). Περιμένετε για 7 λεπτά, μέχρι να σχηματιστεί η προστατευτική μεμβράνη.
- 2) Ο σχηματισμός μιας ανθεκτικής και διαλυτής μεμβράνης επιτρέπει την καλύτερη δυνατή διατήρηση του κυτταρικού υλικού μέχρι τη χρώση.
- 3) Το μονιμοποιημένο επίχρισμα μπορεί να υποβληθεί σε χρώση απευθείας. Παρ' όλα αυτά, συνιστάται η αφαίρεση της κηρώδους μεμβράνης σε αποσταγμένο νερό (1-2 λεπτά).

Τεχνικά δεδομένα

Τεχνικά δεδομένα	Αναμενόμενος στόχος	Προϊόν για την παρασκευή κυτταροϊστολογικών δειγμάτων για οπτική μικροσκοπία. Μονιμοποιητικό ψεκασμού για κολπική κυτταρολογία.		
	Συνολική περιεκτικότητα σε αλκοόλ	89		
Συσκευασία	Κύριος περιέκτης	Πρωτεύων περιέκτης: λευκή φιάλη ψεκασμού από PVC και προστατευτικό πώμα. Ωφέλιμη χωρητικότητα 200 ml. Η μεταξοτυπία είναι ανθεκτική στο νερό, την αλκοόλη και τους διαλύτες.		
	Ετικέτα	Ετικέτα PVC ανθεκτική σε φθορά, νερό, αλκοόλη και διαλύτες. Μελάνι ανθεκτικό στη χάραξη και στο νερό και την αλκοόλη.		
	Δευτερεύων περιέκτης	Κουτί από χαρτόνι		
Συστατικά μέρη	Αιθανόλη	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Ισοπροπανόλη	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Υδατοδιαλυτά πολυμερή	-	-	-
	Απιονισμένο νερό	-	-	-
Αποθήκευση	Θερμοκρασία	Αποθηκεύστε το παρασκεύασμα σε θερμοκρασία δωματίου. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.		
	Σταθερότητα	Μετά το πρώτο άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, εάν έχει αποθηκευτεί σωστά.		
	Εγκυρότητα προϊόντος	5 έτη		
Προειδοποιήσεις	Ταξινόμηση προϊόντων	Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση για επαγγελματίες υγείας. Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην ετικέτα (σύμβολα κινδύνου, φράσεις κινδύνου και ασφάλειας) και συμβουλευτείτε πάντα το φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν ο πρωτεύων περιέκτης έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να ενημερώσετε αμέσως την Bio-Optica Milano S.p.A και τις αρμόδιες αρχές.		
	Απόρριψη	Επικίνδυνη παρασκευή: τηρήστε όλους τους κρατικούς και τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των απορριμμάτων.		

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ αρ.	ΑΙΤΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
001	Προσαρμογή κανονισμού UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022