



## BIO FIX



LUETTELONUMERO	YKSIKKÖKOKO
05-X200	4 x 200 ml



In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinällinen laite

EMDN: W01030705

IVD, luokka A, asetus (EU) 2017/746

Basic UDI: 080339762W01030705X2

UDI-DI: 08033976235079



Valmistaja: Bio-Optica Milano S.p.A.

Fiksatiivisuihke sytologisille emätinnäytteille.

### KIINNITYSMENETELMÄ

- 1) Suihkuta tasaisesti sivelynäytteelle (3–4 kertaa). Odota 7 minuuttia, että näytteelle muodostuu suojakalvo.
- 2) Muodostuva kestävä ja liukoinen kalvo suojaa solumateriaalia parhaalla tavalla ennen värjäystä.
- 3) Fiksoidun näytteen voi värjätä suoraan. Vahamaisen kalvon poisto tislatulla vedellä (1–2 minuuttia) on kuitenkin suositeltavaa.

### Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Käyttötarkoitus	Tuote sytologisten näytteiden valmisteluun optista mikroskopiaa varten. Fiksatiivisuihke sytologisille emätinnäytteille.		
	Alkoholin kokonaispitoisuus	89		
Pakkaus	Primaaripakkaus	Valkoinen PVC-suihkepullo, jossa suojakorkki. Käyttötilavuus 200 ml. Serigrafia on veden-, alkoholin- ja liuotteenkestävä.		
	Etiketti	Kulutuksen-, veden-, alkoholin- ja liuotteenkestävä PVC-etiketti. Naarmuuntumaton veden- ja alkoholinkestävä muste.		
	Sekundääripakkaus	Pahvilaatikko		
Ainesosat	Etanoli	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Isopropanoli	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Vesiliukoiset polymeerit	-	-	-
	Deionisoitu vesi	-	-	-
Säilytys	Lämpötila	Säilytä valmiste huoneenlämmössä. Pidä astiat tiiviisti suljettuina.		
	Stabiliteetti	Avattua tuotetta voidaan käyttää viimeiseen käyttöpäivään saakka, jos sitä säilytetään oikein.		
	Tuotteen säilyvyysaika	5 vuotta		
Varoitukset	Tuotteen luokitus	Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen laboratoriokäyttöön terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Lue huolellisesti pakkausmerkinnät (vaarasymbolit, riski- ja turvalausekkeet) ja tutustu aina käyttöturvallisuustiedotteeseen. Älä käytä tuotetta, jos primaaripakkaus on vaurioitunut. Jos tapahtuu vakava onnettomuus, suosittelemme ottamaan heti yhteyttä Bio-Optica Milano S.p.A:han ja toimivaltaisiin viranomaisiin.		
	Hävittäminen	Vaarallinen valmiste: noudata kaikkia jätteiden hävittämistä koskevia kansallisia ja paikallisia ympäristösäännöksiä.		

VERSION NRO	SY	MUOKKAUKSEN PVM
001	Asetuksen (EU) 2017/746 mukaisesti	22.9.2022